

基本性能・安全性が格段に向上！ CC-800マイクロウェーブ温熱器



緊急停止ボタン

照射開始ボタン

照射終了ボタン

昇降機リモコン

照射器本体を上下に移動させることができます。

品名：マイクロウェーブ温熱器
モデル：CC-800
サイズ：23cm×26cm×23cm
重さ：16Kg
電圧：100V 50-60Hz
出力：600・800・1000W
消費電力：1650W

●商品紹介

従来品の温熱器では不可能だった寝た状態での照射を可能にしました。

座った状態・立った状態を維持できない方にも照射可能となります。また、従来品は設定出力との実際の出力に誤差が生じる場合がありましたが、本機は設定値通りの照射が可能です。更に2機配備することにより前後同時照射することができます。

スポーツ選手にも大人気商品！
お気軽にご相談ください。

●商品情報

寝ながら使える最長30分タイマー付き！

- マイクロ波照射出力を3段階切替可能
- 照射器本体を上下移動可能
- ベッドに寝た状態で照射可能
- 簡単操作パネル安全性の向上！
- 温度センサーが異常を感知すると自動停止
- 本体操作パネル・リモコンに緊急停止ボタン配置
- 操作パネルへの誤った異常数値は入力不可
- 大型冷却ファンによる温度管理



操作パネル設定値

出力モード	初期設定			設定可能値		
	照射時間	休止時間	照射回数	照射時間	休止時間	照射回数
Low	12秒	3秒	6回	1～15秒	1～10秒	1～99秒
Mid	7秒	3秒	5回	1～10秒	1～10秒	1～99秒
High	3秒	3秒	3回	1～3秒	1～10秒	1～99秒



操作リモコン

昇降機リモコン

本体から伸びる操作リモコンは、マイクロ波照射開始・停止・緊急停止を行うことができます。

出力モード 照射時間 休止時間照射回数の設定を本体側で行った後、RUNボタンを押すとマイクロ波照射が開始されます。

緊急停止ボタンで停止させた場合は、安全の為、ロックが掛かります。

ロックされている状態では、一切の操作を受け付けなくなります。

設定した照射回数が終了すると、安全確保の為、全て初期化に戻ります。

同じ値で連続照射したい場合は、再度本体側で設定を行います。

昇降機リモコンは、照射器本体を上下に移動させることができます。

Clean
Development
Creative

株式会社シーディシー

私たちの技術が笑顔を作る

私たちの技術が感謝を生み出す

私たちの技術が未来をひらく

販売代理店:株式会社SEKITOBA

〒650-0001

兵庫県神戸市中央区加納町2-8-10-306

Mail: info.sekitoba@gmail.com

web: <https://sktb.jp>